

FECE: MICROSCOPICO.

MODALITA' DI RICHIESTA:

Pazienti interni: inserimento informatico dai reparti e modulo interno prestampato per gli ambulatoriali.

Pazienti esterni: tramite richiesta del medico curante o specialista, inserimento degli esami richiesti in laboratorio on-line da parte del paziente

PREPARAZIONE DEL PAZIENTE ALL'ESAME:

Alcuna.

MODALITA' DI RACCOLTA DEL CAMPIONE:

Il campione di feci deve essere raccolto in provetta di prelievo priva di detergenti, conservanti o terreni di trasporto.

MODALITA' DI TRASPORTO DEL CAMPIONE:

Pazienti interni: da ogni stanza i campioni sono portati da un infermiere o un operatore sanitario in un contenitore adeguato in laboratorio. Vedi procedure.

Pazienti esterni punto prelievi interno: dalla sala prelievi i campioni sono portati al laboratorio in contenitori adeguati di trasporto. Vedi procedure.

Pazienti esterni punti prelievi esterni: i campioni arrivano in laboratorio mediante i fattorini della Casa di Cura. Vedi procedure.

MODALITA' DI CONSERVAZIONE DEL CAMPIONE:

Il campione può essere conservato 8 ore tra 2 e 8°C.

FASE PRE-ANALITICA:

Il check-in viene eseguito manualmente.

Il campione di feci è strisciato su un vetrino portaoggetti con 0.05 ml di soluzione fisiologica. Sul tutto è posto un vetrino coprioggetti.

FASE ANALITICA:

Si osserva al microscopio per la presenza di:

- fibre carnee indigerite;
- parassiti o uova;
- trofozoiti di Ameba;
- fibre vegetali;
- miceti;
- globuli bianchi;
- eritrociti;
- granuli di amido
- lipidi

FASE POST-ANALITICA:

I dati ottenuti sono trascritti su apposito foglio di lavoro, inseriti nel PC gestionale, validati tecnicamente, poi clinicamente e infine firmati.

CRITERI DI VALIDAZIONE DEL DATO ANALITICO:

Non applicabile.

VALORI PANICO:

Non applicabile.

CARATTERISTICHE E DESCRIZIONE DEL METODO:

Metodo microscopico.

PRECISIONE, ACCURATEZZA E SENSIBILITA':

Non applicabile.

INTERFERENZE:

Alcuna.

SIGNIFICATIVITA' (VARIABILITA' ANALITICA E VARIABILITA' BIOLOGICA):

Non applicabile.

COMPILAZIONE, TRASMISSIONE E CONSEGNA REFERTI:

I dati trascritti nel foglio di lavoro sono inseriti manualmente nel PC gestionale.

I risultati, dopo la validazione tecnica sono controllati e validati clinicamente per poi essere firmati digitalmente dal responsabile del laboratorio o da chi ne fa le veci.

Dopo la firma digitale i referti sono disponibili on line per essere visionati dai reparti se i pazienti sono interni.

Per i pazienti esterni i referti possono essere stampati su richiesta alla segreteria o sono accessibili via internet tramite l'utilizzo dell'apposito codice rilasciato al momento dell'accettazione del paziente dalla segreteria.

PRINCIPALI CRITERI INTERPRETATIVI:

Anormale la presenza di fibre carni non digerite, di uova o parassiti.

TEMPO DI ATTESA PER L'ESAME:

Uguale o inferiore a 8 ore.

18/10/2021