

## IDENTIFICAZIONE

### **MODALITA' DI RICHIESTA:**

Pazienti interni: inserimento informatico dai reparti e modulo interno prestampato per gli ambulatoriali.

Pazienti esterni: tramite richiesta del medico curante o specialista, inserimento degli esami richiesti in laboratorio on-line da parte del paziente.

### **PREPARAZIONE DEL PAZIENTE ALL'ESAME:**

Il paziente deve aver terminato un eventuale trattamento antibiotico da almeno 5 giorni.

### **MODALITA' DI RACCOLTA DEL CAMPIONE:**

Il campione è raccolto con contenitore sterile.

### **MODALITA' DI TRASPORTO DEL CAMPIONE:**

Pazienti interni: da ogni stanza i campioni sono portati da un infermiere o un operatore sanitario in un contenitore adeguato in laboratorio. Vedi procedure.

Pazienti esterni punto prelievi interno: dalla sala prelievi i campioni sono portati al laboratorio in contenitori adeguati di trasporto. Vedi procedure.

Pazienti esterni punti prelievi esterni: i campioni arrivano in laboratorio mediante i fattorini della Casa di Cura. Vedi procedure.

### **MODALITA' DI CONSERVAZIONE DEL CAMPIONE:**

Non si può conservare.

### **FAE PRE-ANALITICA:**

Si effettua l'identificazione del germe.

### **FASE ANALITICA:**

L'identificazione è effettuata sulla base di un orientamento di base sulle caratteristiche del germe da testare.

Vengono utilizzate le seguenti card per identificazione

Germi Gram -: GN

Germi Gram+ : GP

Lieviti: YST

Altri germi: NH

L'identificazione è letta dal sistema automatico VITEK 2 COMPACT BIOMERIEUX. (Metodica allegata allo strumento).

### **FASE POST-ANALITICA:**

I dati ottenuti vengono validati tecnicamente poi clinicamente e quindi firmati digitalmente.

### **CRITERI DI VALIDAZIONE DEL DATO ANALITICO:**

L'antibiogramma non è letto dallo strumento se non c'è crescita nei pozzetti di controllo. Il sistema esperto dello strumento valuta i risultati ottenuti sperimentalmente.

### **VALORI PANICO:**

Non applicabile. Vedi **PROCEDURA GERMI SENTINELLA**.

### **CARATTERISTICHE E DESCRIZIONE DEL METODO (PRECISIONE ED ACCURATEZZA):**

Non applicabile in questo caso.

### **INTERFERENZE:**

Terapia antibiotica o antimicotica in corso.

### **SIGNIFICATIVITA' (VARIABILITA' ANALITICA E VARIABILITA' BIOLOGICA):**

Non applicabile.

### **PRINCIPALI CRITERI INTERPRETATIVI:**

Non applicabile

**COMPILAZIONE, TRASMISSIONE E CONSEGNA REFERTI:**

I risultati, dopo la validazione tecnica sono controllati e validati clinicamente per poi essere firmati digitalmente dal responsabile del laboratorio e dal personale autorizzato.

Dopo la firma digitale i referti sono disponibili on line per essere visionati dai reparti se i pazienti sono interni.

Per i pazienti esterni i referti possono essere stampati su richiesta alla segreteria o sono accessibili via internet tramite l'utilizzo dell'apposito codice rilasciato al momento dell'accettazione del paziente dalla segreteria.

**TEMPO DI ATTESA PER L'ESAME:**

24 ore.

18/10/2021