

SANGUE OCCULTO

MODALITA' DI RICHIESTA:

Pazienti interni: inserimento informatico dai reparti e modulo interno prestampato per gli ambulatoriali.

Pazienti interni urgenti: informatico dai reparti con richiesta cartacea

Pazienti esterni: tramite richiesta del medico curante o specialista, inserimento degli esami richiesti in laboratorio on-line da parte del paziente.

PREPARAZIONE DEL PAZIENTE ALL'ESAME:

Nessuna. Non è richiesta alcuna dieta specifica.

MODALITA' DI RACCOLTA DEL CAMPIONE:

Campione di feci raccolto in contenitore sterile o per effettuare la raccolta su più giornate apposito contenitore dotato di conservante e disponibile per i pazienti presso i punti prelievo.

MODALITA' DI TRASPORTO DEL CAMPIONE:

Pazienti interni: da ogni stanza i campioni sono portati da un infermiere o un operatore sanitario in un contenitore adeguato in laboratorio. Vedi procedure.

Pazienti esterni punto prelievi interno: dalla sala prelievi i campioni sono portati al laboratorio in contenitori adeguati di trasporto. Vedi procedure.

Pazienti esterni punti prelievi esterni: i campioni arrivano in laboratorio mediante i fattorini della Casa di Cura. Vedi procedure.

MODALITA' DI CONSERVAZIONE DEL CAMPIONE:

Il campione di feci senza conservante deve essere processato entro la giornata.

I campioni raccolti nell'apposito contenitore si possono conservare a temperatura ambiente fino a 14 gg.

FASE PRE-ANALITICA:

Il check-in viene eseguito manualmente.

I campioni senza conservante vanno inseriti nell'apposito contenitore mediante l'asticella e lasciati in incubazione per almeno 1h.

FASE ANALITICA:

I contenitori sono posti negli appositi rack e caricati sullo strumento OC SENSOR IO.

FASE POST-ANALITICA:

I dati ottenuti sono trasmessi automaticamente, validati tecnicamente poi clinicamente e quindi firmati digitalmente.

CRITERI DI VALIDAZIONE DEL DATO ANALITICO:

Controlli Interni eseguiti quotidianamente.

VALORI PANICO:

Non applicabile

CARATTERISTICHE E DESCRIZIONE DEL METODO (PRECISIONE ED ACCURATEZZA):

Vedi scheda tecnica

PRECISIONE, ACCURATEZZA E SENSIBILITA':

Vedi scheda tecnica

INTERFERENZE:

Vedi scheda tecnica

SIGNIFICATIVITA' (VARIABILITA' ANALITICA E VARIABILITA' BIOLOGICA):

Non applicabile.

COMPILAZIONE, TRASMISSIONE E CONSEGNA REFERTI:

I dati trascritti nel foglio di lavoro sono inseriti manualmente nel PC gestionale.

I risultati, dopo la validazione tecnica sono controllati e validati clinicamente per poi essere firmati digitalmente dal responsabile del laboratorio e dal personale autorizzato.

Dopo la firma digitale i referti sono disponibili on line per essere visionati dai reparti se i pazienti sono interni.

Per i pazienti esterni i referti possono essere stampati su richiesta alla segreteria o sono accessibili via internet tramite l'utilizzo dell'apposito codice rilasciato al momento dell'accettazione del paziente dalla segreteria.

PRINCIPALI CRITERI INTERPRETATIVI:

Vedi scheda tecnica

TEMPO DI ATTESA PER L'ESAME:

Uguale o inferiore a 4 ore

Aggiornamento 18/10/2024