

ANTIBIOGRAMMA O ANTIMICOGRAMMA

MODALITA' DI RICHIESTA:

Pazienti interni: inserimento informatico dai reparti e modulo interno prestampato per gli ambulatoriali.

Pazienti esterni: tramite richiesta del medico curante o specialista, inserimento degli esami richiesti in laboratorio on-line da parte del paziente.

PREPARAZIONE DEL PAZIENTE ALL'ESAME:

Il paziente deve aver terminato un eventuale trattamento antibiotico da almeno 5 giorni.

MODALITA' DI RACCOLTA DEL CAMPIONE:

Il campione è raccolto con contenitore sterile.

MODALITA' DI TRASPORTO DEL CAMPIONE:

Pazienti interni: da ogni stanza i campioni sono portati da un infermiere o un operatore sanitario in un contenitore adeguato in laboratorio. Vedi procedure.

Pazienti esterni punto prelievi interno: dalla sala prelievi i campioni sono portati al laboratorio in contenitori adeguati di trasporto. Vedi procedure.

Pazienti esterni punti prelievi esterni: i campioni arrivano in laboratorio mediante i fattorini della Casa di Cura. Vedi procedure.

MODALITA' DI CONSERVAZIONE DEL CAMPIONE:

Non si può conservare.

FAE PRE-ANALITICA:

Si effettua l'identificazione del germe.

FASE ANALITICA:

L'antibiogramma o l'antimicogramma è effettuato sulla base di un orientamento di base sulle caratteristiche del germe da testare.

Vengono utilizzate le seguenti card per antibiogramma

Germi Gram -: AST N437, N438

Germi Gram +: AST P658, P659, ST03

Lieviti: YST 07

L'antibiogramma o l'antimicogramma è letto dal sistema automatico VITEK 2 COMPACT BIOMERIEUX. (Metodica allegata allo strumento).

FASE POST-ANALITICA:

I dati ottenuti vengono validati tecnicamente poi clinicamente e quindi firmati digitalmente.

CRITERI DI VALIDAZIONE DEL DATO ANALITICO:

L'antibiogramma non è letto dallo strumento se non c'è crescita nei pozzetti di controllo. Il sistema esperto dello strumento valuta i risultati ottenuti sperimentalmente.

VALORI PANICO:

Non applicabile. Vedi **PROCEDURA GERMI SENTINELLA**.

CARATTERISTICHE E DESCRIZIONE DEL METODO (PRECISIONE ED ACCURATEZZA):

Non applicabile in questo caso.

INTERFERENZE:

Terapia antibiotica o antimicotica in corso.

SIGNIFICATIVITA' (VARIABILITA' ANALITICA E VARIABILITA' BIOLOGICA):

Non applicabile.

PRINCIPALI CRITERI INTERPRETATIVI:

S: sensibile, I: attivo solo ad alti dosaggi, R: resistente.

COMPILAZIONE, TRASMISSIONE E CONSEGNA REFERTI:

I risultati, dopo la validazione tecnica sono controllati e validati clinicamente per poi essere firmati digitalmente dal responsabile del laboratorio e dal personale autorizzato.

Dopo la firma digitale i referti sono disponibili on line per essere visionati dai reparti se i pazienti sono interni.

Per i pazienti esterni i referti possono essere stampati su richiesta alla segreteria o sono accessibili via internet tramite l'utilizzo dell'apposito codice rilasciato al momento dell'accettazione del paziente dalla segreteria.

TEMPO DI ATTESA PER L'ESAME:

24 ore.

Aggiornamento 18/10/2024