

## FECE: MICROSCOPICO.

### **MODALITA' DI RICHIESTA:**

Pazienti interni: inserimento informatico dai reparti e modulo interno prestampato per gli ambulatoriali.

Pazienti esterni: tramite richiesta del medico curante o specialista, inserimento degli esami richiesti in laboratorio on-line da parte del paziente

### **PREPARAZIONE DEL PAZIENTE ALL'ESAME:**

Alcuna.

### **MODALITA' DI RACCOLTA DEL CAMPIONE:**

Il campione di feci deve essere raccolto in provetta di prelievo priva di detergenti, conservanti o terreni di trasporto.

### **MODALITA' DI TRASPORTO DEL CAMPIONE:**

Pazienti interni: da ogni stanza i campioni sono portati da un infermiere o un operatore sanitario in un contenitore adeguato in laboratorio. Vedi procedure.

Pazienti esterni punto prelievi interno: dalla sala prelievi i campioni sono portati al laboratorio in contenitori adeguati di trasporto. Vedi procedure.

Pazienti esterni punti prelievi esterni: i campioni arrivano in laboratorio mediante i fattorini della Casa di Cura. Vedi procedure.

### **MODALITA' DI CONSERVAZIONE DEL CAMPIONE:**

Il campione può essere conservato 8 ore tra 2 e 8°C.

### **FASE PRE-ANALITICA:**

Il check-in viene eseguito manualmente.

Il campione di feci è strisciato su un vetrino portaoggetti con 0.05 ml di soluzione fisiologica. Sul tutto è posto un vetrino coprioggetti.

### **FASE ANALITICA:**

Si osserva al microscopio per la presenza di:

- fibre carnee indigerite;
- parassiti o uova;
- trofozoiti di Ameba;
- fibre vegetali;
- miceti;
- globuli bianchi;
- eritrociti;
- granuli di amido
- lipidi

### **FASE POST-ANALITICA:**

I dati ottenuti sono trascritti su apposito foglio di lavoro, inseriti nel PC gestionale, validati tecnicamente, poi clinicamente e infine firmati.

### **CRITERI DI VALIDAZIONE DEL DATO ANALITICO:**

Non applicabile.

### **VALORI PANICO:**

Non applicabile.

### **CARATTERISTICHE E DESCRIZIONE DEL METODO:**

Metodo microscopico.

### **PRECISIONE, ACCURATEZZA E SENSIBILITA':**

Non applicabile.

**INTERFERENZE:**

Contaminazione del campione, ad esempio pollini di derivazione ambientale.

**SIGNIFICATIVITA' (VARIABILITA' ANALITICA E VARIABILITA' BIOLOGICA):**

Non applicabile.

**COMPILAZIONE, TRASMISSIONE E CONSEGNA REFERTI:**

I dati trascritti nel foglio di lavoro sono inseriti manualmente nel PC gestionale.

I risultati, dopo la validazione tecnica sono controllati e validati clinicamente per poi essere firmati digitalmente dal responsabile del laboratorio o da chi ne fa le veci.

Dopo la firma digitale i referti sono disponibili on line per essere visionati dai reparti se i pazienti sono interni.

Per i pazienti esterni i referti possono essere stampati su richiesta alla segreteria o sono accessibili via internet tramite l'utilizzo dell'apposito codice rilasciato al momento dell'accettazione del paziente dalla segreteria.

**PRINCIPALI CRITERI INTERPRETATIVI:**

Anormale la presenza di fibre carni non digerite, di uova o parassiti.

**TEMPO DI ATTESA PER L'ESAME:**

Uguale o inferiore a 8 ore.

Aggiornamento 10/10/2024