

## TEST DI GRAVIDANZA (urine)

### **MODALITA' DI RICHIESTA:**

Pazienti interni: inserimento informatico dai reparti e modulo interno prestampato per gli ambulatoriali.

Pazienti interni urgenti: informatico dai reparti con richiesta cartacea

Pazienti esterni: tramite richiesta del medico curante o specialista, inserimento degli esami richiesti in laboratorio on-line da parte del paziente.

### **PREPARAZIONE DEL PAZIENTE ALL'ESAME:**

Il paziente deve aver terminato un eventuale trattamento antibiotico da almeno 5 giorni.

Prima della raccolta dell'urina, devono essere accuratamente lavati i genitali esterni con un detergente neutro.

### **MODALITA' DI RACCOLTA DEL CAMPIONE:**

Il campione è raccolto tramite tampone sterile.

### **MODALITA' DI TRASPORTO DEL CAMPIONE:**

Pazienti interni: da ogni stanza i campioni sono portati da un infermiere in un contenitore adeguato in laboratorio.

Pazienti esterni punto prelievi interno: dalla sala prelievi (attigua al laboratorio) i campioni, attraverso l'apposita finestra, sono consegnati al laboratorio.

Pazienti esterni punti prelievi esterni: i campioni arrivano in laboratorio mediante i fattorini della Casa di Cura.

Vedi procedure.

### **MODALITA' DI CONSERVAZIONE DEL CAMPIONE:**

Il campione è seminato entro breve tempo dal ricevimento. Il campione può essere conservato 24 ore a 4°C.

### **FASE PRE-ANALITICA:**

Il check-in viene eseguito manualmente.

Il campione viene immediatamente seminato.

### **FASE ANALITICA:**

Dalla provetta madre si prelevano tre gocce (100µL) urina e si dispensano nel pozzetto card. Il campione migra per capillarità e si ha la comparsa di bande.

La banda di controllo C deve sempre essere presente. Dopo 3 minuti si leggono i risultati.

Vedi procedure.

### **FASE POST-ANALITICA:**

I dati ottenuti sono trascritti su apposito foglio di lavoro, validati tecnicamente poi clinicamente e quindi firmati digitalmente.

### **CRITERI DI VALIDAZIONE DEL DATO ANALITICO:**

Controllo interno del test: comparsa della banda nella zona C.

### **VALORI PANICO.**

Non applicabile.

### **CARATTERISTICHE E DESCRIZIONE DEL METODO (PRECISIONE ED ACCURATEZZA):**

Vedi scheda tecnica.

### **INTERFERENZE:**

Alcuna.

### **SIGNIFICATIVITA' (VARIABILITA' ANALITICA E VARIABILITA' BIOLOGICA):**

Non applicabile.

### **COMPILAZIONE, TRASMISSIONE E CONSEGNA REFERTI:**

I risultati, dopo la validazione tecnica sono controllati e validati clinicamente per poi essere firmati digitalmente dal responsabile del laboratorio e dal personale autorizzato.

Dopo la firma digitale i referti sono disponibili on line per essere visionati dai reparti se i pazienti sono interni, mentre i dati possono essere visualizzati già dopo la validazione clinica.

Per i pazienti esterni i referti possono essere stampati su richiesta alla segreteria o sono accessibili via internet tramite l'utilizzo dell'apposito codice rilasciato al momento dell'accettazione del paziente dalla segreteria.

**PRINCIPALI CRITERI INTERPRETATIVI:**

Specificati nella risposta.

**TEMPO DI ATTESA PER L'ESAME:**

Inferiore a 8 ore.

20/05/2018