

## PROTEINE URINARIE

### **MODALITA' DI RICHIESTA:**

Pazienti interni: inserimento informatico dai reparti e modulo interno prestampato per gli ambulatoriali.

Pazienti interni urgenti: informatico dai reparti con richiesta cartacea

Pazienti esterni: tramite richiesta del medico curante o specialista, inserimento degli esami richiesti in laboratorio on-line da parte del paziente.

### **PREPARAZIONE DEL PAZIENTE ALL'ESAME:**

Alcuna.

### **MODALITA' DI RACCOLTA DEL CAMPIONE:**

Il campione di urina deve essere delle 24 o 12 ore, raccolto in contenitore senza additivi.

### **MODALITA' DI TRASPORTO DEL CAMPIONE:**

Pazienti interni: da ogni stanza i campioni sono portati da un infermiere in un contenitore adeguato in laboratorio.

Pazienti esterni punto prelievi interno: dalla sala prelievi (attigua al laboratorio) i campioni, attraverso l'apposita finestra, sono consegnati al laboratorio.

Pazienti esterni punti prelievi esterni: i campioni arrivano in laboratorio mediante i fattorini della Casa di Cura.

Vedi procedure.

### **MODALITA' DI CONSERVAZIONE DEL CAMPIONE:**

Il campione può essere conservato 1 giorno tra 2 e 8°C.

### **FASE PRE-ANALITICA:**

Il check-in viene eseguito manualmente.

Il volume del campione è misurato e la diuresi scritta nel relativo foglio di lavoro. Un'aliquota del campione è versata in una provetta etichettata adeguata per essere introdotta nello strumento.

La provetta è centrifugata a 2000 rpm per 10 minuti.

### **FASE ANALITICA:**

La provetta madre è posizionata sul rack porta campioni dello strumento COBAS 6000 ROCHE e quindi processata secondo le modalità analitiche previste.

### **FASE POST-ANALITICA:**

I dati ottenuti vengono validati tecnicamente poi clinicamente e quindi firmati digitalmente.

### **CRITERI DI VALIDAZIONE DEL DATO ANALITICO:**

Analisi dei controlli qualità interni, confronto con lo storico del paziente e periodica analisi dei controlli qualità esterni (VEQ).

### **VALORI PANICO:**

Non applicabile

### **CARATTERISTICHE E DESCRIZIONE DEL METODO:**

Vedi scheda tecnica allegata.

### **PRECISIONE, ACCURATEZZA E SENSIBILITA':**

Vedi scheda tecnica allegata.

### **INTERFERENZA:**

Vedi scheda tecnica allegata.

### **SIGNIFICATIVITA' (VARIABILITA' ANALITICA E VARIABILITA' BIOLOGICA)**

VA: vedi scheda tecnica allegata. VB: 35.5%

### **COMPILAZIONE, TRASMISSIONE E CONSEGNA REFERTI:**

I risultati, dopo la validazione tecnica sono controllati e validati clinicamente per poi essere firmati digitalmente dal responsabile del laboratorio e dal personale autorizzato.

Dopo la firma digitale i referti sono disponibili on line per essere visionati dai reparti se i pazienti sono interni, mentre i dati possono essere visualizzati già dopo la validazione clinica.

Per i pazienti esterni i referti possono essere stampati su richiesta alla segreteria o sono accessibili via internet tramite l'utilizzo dell'apposito codice rilasciato al momento dell'accettazione del paziente dalla segreteria.

**PRINCIPALI CRITERI INTERPRETATIVI:**

Vedi scheda tecnica allegata.

**TEMPO DI ATTESA PER L'ESAME:**

Uguale o inferiore a 8 ore.

20/05/2018